

# Montageanleitung für Zehensteg-Riemchen



**BAUSATZ EVA TRIPLEX FEEL!it**

# EVA TRIPLEX FEEL!it M und N - die Materialien:

## Zur Herstellung von individuellen Flipflop-Sandalen

### Variante 1 - stabilisierend:

- Bettungsrohling **TRIPLEX M**
- Zwischensohle **EVA SKIN 60**, 8 mm
- Laufsohle **LaTrans** mule gelb, 3,5 mm
- Auswahl an Zehensteg-Riemchen aus Textilmaterial

| SCHICHTAUFBAU | TRIPLEX M | STÄRKE | FUNKTION       | FARBE  |
|---------------|-----------|--------|----------------|--------|
| EVA SKIN 25   |           | 6 mm   | anformend      | skin   |
| EVA 55        |           | 2 mm   | stabilisierend | türkis |
| EVA 55        |           | 12 mm  | dämpfend       | orange |



### Variante 2 - hochelastisch:

- Bettungsrohling **TRIPLEX N**
- Zwischensohle **EVA SPEZIAL 60**, 8 mm
- Laufsohle **LiteTech Dots blau**, 4 mm
- Auswahl an Zehensteg-Riemchen aus Textilmaterial



| SCHICHTAUFBAU | TRIPLEX N | STÄRKE | FUNKTION       | FARBE    |
|---------------|-----------|--------|----------------|----------|
| EVA PRIMA 15  |           | 5 mm   | anformend      | hellgrau |
| EVA PRIMA 30  |           | 5 mm   | hochelastisch  | hellblau |
| EVA 55        |           | 12 mm  | stabilisierend | grau     |



## EVA TRIPLEX FEEL!it M und N - die Montage:

**Um einen perfekten Sitz von EVA TRIPLEX FEEL!it zu gewährleisten, sollten die nachfolgenden Arbeitsschritte mit direkter Anpassung am Fuß durchgeführt werden.**

### **1. Befestigungspunkt für Zehensteg festlegen:**

1.1 Nach erfolgter Anprobe und Markierung mittels eines Silber- oder Bleistiftes o.g. Befestigungspunkt festlegen – zwischen 1. und 2. Zeh am Ende des Fußrückens.

1.2 Mit einem runden Locheisen den markierten Punkt ausstanzen



## 2. Montage Zehensteg:

- 2.1 Zehenstegband doppelt aufeinanderlegen, die gefaltete Seite soll hierbei in Richtung des Fußrückens zeigen, so werden Druckstellen vermieden.



- 2.2 Der Einsatz eines Nagelortes erleichtert die Durchführung des Zehenstegbandes deutlich



### **3. Montage der seitlichen Riemchen:**

3.1 Anpassung direkt an den Fuß

3.2 Seitlichen Verlauf der Riemchen mit einem Silber- oder Bleistift markieren



## 4. Riemchen plantar integrieren:



### 4.1 Markierung der plantaren Lage

### 4.2 Ausschleifen und Integration in das Fußbett

### 4.3 Verlauf von unten





5. Verklebung mit einem Neopren- oder Polychloropren-Klebstoff

6. Falls notwendig Zwischensohle aufbauen und verkleben
7. Laufsohle verkleben und ausputzen – F E R T I G ! ! !







Laufsohle LaTrans Mule  
3,5 mm, gelb




Laufsohle LiteTech Dots  
4,0 mm, blau



Farbbeispiele für Zehensteg-Riemchen

## Baukasten EVA TRIPLEX FEEL!it - konfigurieren Sie Ihr Modell:

|                                                  | Flipflop Riemchen       | Anzahl |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| ① Flipflop Riemchen Damen blau-flower            | 81700-275               |        |
| ② Flipflop Riemchen Damen rot-flower             | 81700-289               |        |
| ③ Flipflop Riemchen Herren hellgrau-weiß         | 81701-260               |        |
| ④ Flipflop Riemchen Herren dunkelbraun-beige     | 81701-246               |        |
| ⑤ Flipflop Riemchen Damen gelb-schwarz           | 81700-270               |        |
| ⑥ Flipflop Riemchen Damen grau-zack              | 81700-256               |        |
| ⑥ Flipflop Riemchen Herren grau-zack             | 81701-256               |        |
| EO1 = (Damen) EO2 = (Herren)                     | <b>Bettungsmaterial</b> |        |
| Bettungsrohling Triplex M LS-EO1                 | WR1004-1                |        |
| Bettungsrohling Triplex M LS-EO2                 | WR1004-2                |        |
| Bettungsrohling Triplex N LS-EO1                 | WR1007-1                |        |
| Bettungsrohling Triplex N LS-EO2                 | WR1007-2                |        |
| EO1 = (Damen) EO2 = (Herren)                     | <b>Zwischensohle</b>    |        |
| Zwischensohle EVA Skin 60 8 mm LS-EO 1           | WR3000-1                |        |
| Zwischensohle EVA Skin 60 8 mm LS-EO 2           | WR3000-2                |        |
| Zwischensohle EVA Spez 60 8 mm grau LS-EO 1      | WR3001-1                |        |
| Zwischensohle EVA Spez 60 8 mm grau LS-EO 2      | WR3001-2                |        |
| EO1 = (Damen) EO2 = (Herren)                     | <b>Laufsohle</b>        |        |
| Laufsohle LaTrans Mule 3,5 mm gelb LS-EO 1       | WR3020-1                |        |
| Laufsohle LaTrans Mule 3,5 mm gelb LS-EO 2       | WR3020-2                |        |
| Laufsohle LiteTech Dots blau 4,0 mm LS-EO 1      | WR3021-1                |        |
| Laufsohle LiteTech Dots blau 4,0 mm LS-EO 2      | WR3021-2                |        |
| Montageanleitung für Bausatz EVA TRIPLEX FEEL!it | WR3099                  |        |

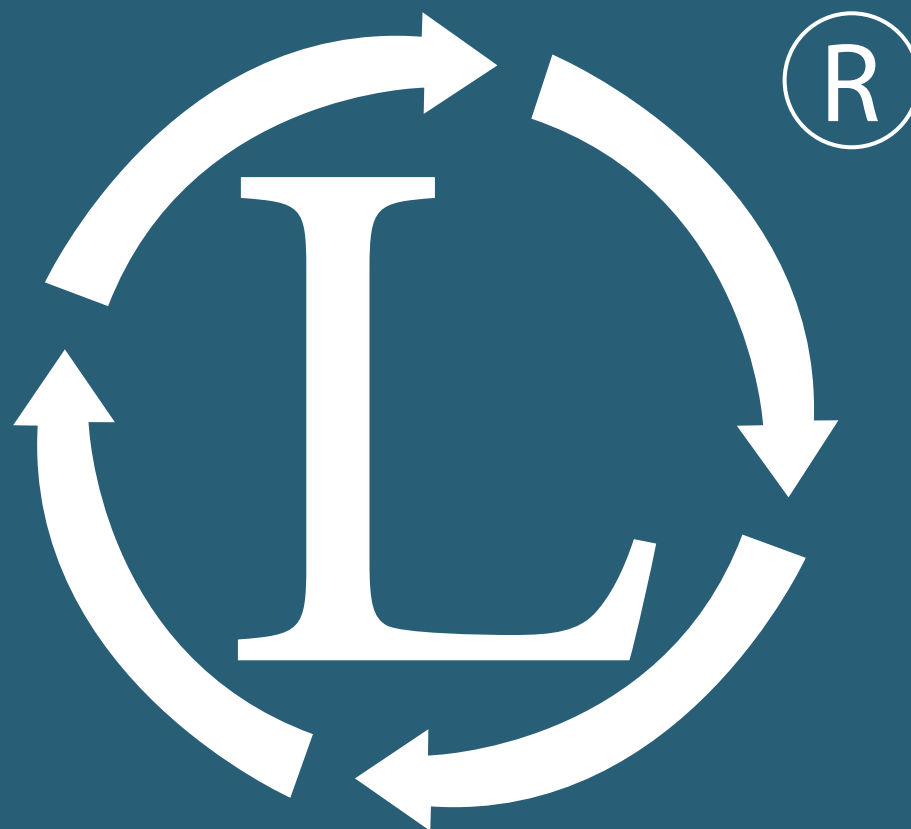

**W. R. Lang GmbH**

Hafenstraße 83 • D-56564 Neuwied

Tel.: +49 (0) 2631 - 34 55 10 • Fax: +49 (0) 2631 - 34 55 30

[service@w-r-lang.de](mailto:service@w-r-lang.de)

[www.w-r-lang.de](http://www.w-r-lang.de)

Art. WR3099