

® W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

EVA Skin EVA SPEZIAL EVA SPEZIAL PLUS EVA SPEZIAL EXTRA EVA SPEZIAL CLEAN® EVA SPEZIAL SANDWICH® EVA
SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® SANDWICH® OT EVA Skin EVA SPEZIAL EVA SPEZIAL PLUS EVA SPEZIAL EXTRA EVA
SPEZIAL CLEAN® EVA SPEZIAL SANDWICH® EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® SANDWICH® OT EVA Skin EVA S
SPEZIAL EVA SPEZIAL PLUS EVA SPEZIAL EXTRA EVA SPEZIAL CLEAN® EVA SPEZIAL SANDWICH® EVA SPEZIAL SA
WICH TRIPLEX® SANDWICH® OT EVA Skin EVA SPEZIAL EVA SPEZIAL PLUS EVA SPEZIAL EXTRA EVA SPEZIAL CLEA
EVA SPEZIAL SANDWICH® EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® SANDWICH® OT EVA Skin EVA SPEZIAL EVA SP
US EVA SPEZIAL EXTRA EVA SPEZIAL CLEAN® EVA SPEZIAL SANDWICH® EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPL
EVA Skin EVA SPEZIAL EVA SPEZIAL PLUS EVA SPEZIAL EXTRA EVA SPEZIAL CLEAN®
SANDWICH TRIPLEX® SANDWICH® OT EVA Skin EVA SPEZIAL

Hochwertige LaNe® EVA Produkte



WICHTIG FÜR UNS: AKTIVITÄT UND BEWEGLICHKEIT ERHALTEN!

INHALTS- VERZEICHNIS



GESCHICHTE W. R. LANG	4	3. AUFBAUMATERIALIEN	20
1. INNENSCHUHMATERIALIEN	6	3.1 EVA AUFBAUPLATTEN	20
1.1 EVA SPEZIAL SANDWICH®	6	3.2 EVA AUFBAUKEILE	22
1.2 EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX®	10	3.3 EVA SPEZIAL 50 AUFBAUSCHMIEGEKEILE	23
1.3 EVA SKIN	14	3.4 LdNe® EVA KEILSOHLEN 28/8	23
1.4 Colorfoam	16	4. STÜTZKORSETTS, ORTHESEN UND PROTHESEN	24
1.5 EVA SPEZIAL MARMOR	16	4.1 SANDWICH® OT ONE	24
1.6 EVA SPEZIAL FARBIG	16	4.2 SANDWICH® OT TWO	25
2. FRÄSMATERIALIEN	18	4.3 SANDWICH® OT THREE	26
2.1 Frässchmiegekeile	18	5. INDIVIDUELLE KONFEKTIONIERUNG	27
2.2 Frässtreifen	19		





W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872



The collage features several historical documents with handwritten text in cursive. A prominent document at the top right contains the following text: *Handwritten text, possibly a letter or official document, mentioning names like 'Herrn ...' and 'zu ...'.*

Below the documents is a page from a shoe catalog, likely from the late 19th or early 20th century. The catalog lists various shoe models with their respective prices and descriptions:

- 805. LA CYCLISTE**: Bottes veau jaune ou noir, chaque carrées. Prix 17.50
- 806. RICHELIEU**: chèvre jaune, doubles semelles cousues. Prix 4.90 et 2.95
- 807. RICHELIEU**: veau jaune, doubles semelles cousues. Prix 12.50, 10.90 et 7.90
- 813. SOULIERS**: Sans Gêne, cheville glacée. Prix 12.50 et 6.90
- 814. SOULIERS**: Princesse, veau vert, talons anglais. Prix 10.90
- 815. SOULIERS**: collets, veau gris, talons anglais. Prix 12.50
- 821. CHARLES IX**: en chevreau glacé, appliques jais. Prix 9.90
- 822. SOULIERS**: cheville glacée, molles perles, doubles semelles. Prix 5.90
- 829. RICHELIEU**: chevreau, triples semelles cousues. Prix 6.90 et 4.90
- 830. RICHELIEU**: veau glacé, anglais, veau glacé. Prix 12.50 et 7.90
- 833. SOULIERS**: FILLETTES du 22 au 24. Prix 1.75, 5.90 et 4.90
- 837. NINON**: veau, fillettes bleu et blanc. Prix 5.90 et 2.95
- 838. BABY**: sans talons, fillettes. Prix 1.45

At the bottom right of the collage, there is a section titled "Mesures de M..." (Measures of M...) with a diagram of a foot and the following text: *Tour de con (Fig. 1), largeur de poitrine (Fig. 2), longueur du dos entre les épaules (Fig. 3), longueur de taille devant (Fig. 4), contour sous les bras au plus fort de la poitrine (Fig. 5). Pour la bonne exécution (1) Prévoir de ...*

1. INNENSCHUH- MATERIALIEN


LANE® EVA PRODUKTE

Glatte Oberflächen, hochwertige Haptik, sehr niedriges Gewicht, hervorragende Verarbeitungs- und Tragequalität. All diese Eigenschaften zeichnen unsere LaNe® EVA Produkte aus. Alle LaNe® EVA-Produkte sind geschlossen zellig und thermoplastisch formbar. Je nach Shore-Härte A zeichnen sich LaNe® EVA-Produkte mit hoher Elastizität, ausgezeichnetem Rückstellvermögen oder mit einer herausragenden Formstabilität aus. Alle LaNe® EVA-Produkte tragen die jeweilige Shore A- Härte bereits im Namen: Beispiel LaNe® EVA SKIN 25 = 25 Shore A. Dies erleichtert Ihnen die Orientierung in unserem umfangreichen EVA Sortiment.

1.1 EVA SPEZIAL SANDWICH®

Vulkanisierte EVA SPEZIAL SANDWICH-Produkte stehen für Effizienz und Wirtschaftlichkeit in der handwerklichen Herstellung von Fußbettungen und individuellen Einlagen. EVA SPEZIAL SANDWICH®-Produkte werden aus zwei verschiedenen EVA-Rezepturen hergestellt und werden bereits während des Herstellungsprozesses dauerhaft und unlöslich miteinander vernetzt. Diese Eigenschaft ist seitens der Patient:innen spürbar und wird durch eine hohe Zufriedenheit honoriert. Durch die glatten Oberflächen ist ein weiteres Beziehen nicht unbedingt notwendig. Falls drei verschiedene Materialien einzusetzen sind, ist jederzeit das Aufkleben einer Abdeckung und/oder einer druckentlastenden Polsterschicht (z. B. INTELLI-PURFLEX kaschiert) möglich.

Als Alternative dient auch – z. B. EVA SKIN 20 mit anfordernder Funktion, falls ein geschlossenzelliges Material im konkreten Versorgungsfall sinnvoller erscheint. Hier entscheidet letztendlich Ihre Vorliebe. Eine weitere Option ist es, EVA SPEZIAL SANDWICH® Produkte mit einer zusätzlichen, in der Regel festeren, Schicht in Richtung Schuhboden zu komplettieren. Die Varianten EVA SPEZIAL SANDWICH® C + F sind hierzu bestens geeignet. Kombinationen mit weiteren festeren und stabilisierenden LaNe® EVA-Produkten als formgebende Elemente z. B. EVA SPEZIAL CLEAN 50) sind hier sinnvoll.

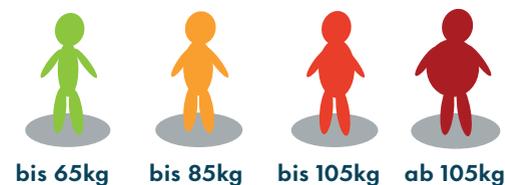



bis 65kg

EVA SPEZIAL SANDWICH® A**EVA SKIN 20 (Shore A) hautfarben - 7 mm - hochelastisch /****EVA 30 (Shore A) mittelgrau - 10 mm - stützend**

Gesamtstärke 17 mm / Plattengröße ca. 860 x 580 mm Aktivierzeit: 6 min. / Abkühlzeit: 12 min.

EVA SPEZIAL SANDWICH® B**EVA SKIN 25 (Shore A) hautfarben - 7 mm - hochelastisch /****EVA 30 (Shore A) schlamm - 10 mm - stützend**

Gesamtstärke 17 mm / Plattengröße 860 x 580 mm / Aktivierzeit: 6 min. / Abkühlzeit: 12 min.

EVA SPEZIAL SANDWICH® D**EVA SKIN 25 (Shore A) hautfarben - 7 mm - hochelastisch /****EVA 50 (Shore A) braun - 8 mm - stützend**

Gesamtstärke 15 mm / Plattengröße 800 x 560 mm / Aktivierzeit: 5 min. / Abkühlzeit: 10 min.

EVA SPEZIAL SANDWICH® E**EVA SKIN 25 (Shore A) hautfarben - 7 mm - hochelastisch /****EVA 40 (Shore A) marineblau - 10 mm - stützend**

Gesamtstärke 17 mm / Plattengröße 860 x 580 mm / Aktivierzeit: 6 min. / Abkühlzeit: 12 min.



bis 85kg

EVA SPEZIAL SANDWICH® E-XL**EVA SKIN 25 (Shore A) hautfarben - 7 mm - hochelastisch / EVA 40 (Shore A) grün - 13 mm - stützend**

Gesamtstärke 20 mm / Plattengröße 860 x 580 mm / Aktivierzeit: 7 min. / Abkühlzeit: 14 min.

EVA SPEZIAL SANDWICH® G**EVA 30 (Shore A) hellblau - 7 mm - dämpfend / EVA 45 (Shore A) gelb-orange - 8 mm - stützend**

Gesamtstärke 15 mm / Plattengröße 820 x 570 mm / Aktivierzeit: 5 min. / Abkühlzeit: 10 min.

EVA SPEZIAL SANDWICH® I SPORT**EVA PRIMA 22 (Shore A) gelb 4 mm - hochelastisch / EVA 45 (Shore A) violett - 8 mm - stützend**

Gesamtstärke 12 mm / Plattengröße 840 x 560 mm / Aktivierzeit: 4 min. / Abkühlzeit: 8 min.

EVA SPEZIAL SANDWICH® C mit anderen EVA Produkten > 30 Shore A zu verarbeiten**EVA SKIN 20 (Shore A) hautfarben - 4 mm - anformend /****EVA 25 (Shore A) kieselgrau - 6 mm - hochelastisch**

Gesamtstärke 10 mm / Plattengröße 830 x 790 mm / Aktivierzeit: 3 min. / Abkühlzeit: 6 min.

EVA SPEZIAL SANDWICH® F mit anderen EVA Produkten > 30 Shore A zu verarbeiten**EVA 20 (Shore A) lichtgrau - 4 mm - anformend / EVA 30 (Shore A) gelb-orange - 3 mm - hochelastisch**

Gesamtstärke 7 mm / Plattengröße 990 x 780 mm / Aktivierzeit: 2,5 min. / Abkühlzeit: 5 min.



bis 105kg

EVA SPEZIAL SANDWICH® H**EVA 35 (Shore A) türkis - 7 mm - hochelastisch / EVA 50 (Shore A) hellgrau - 8 mm - stützend**

Gesamtstärke 15 mm / Plattengröße 780 x 550 mm / Aktivierzeit: 6 min. / Abkühlzeit: 12 min.

EVA SPEZIAL SANDWICH® N-XL**EVA PRIMA 30 (Shore A) düne - 7 mm - hochelastisch / EVA 55 (Shore A) dornfelder - 13 mm - stützend**

Gesamtstärke 20 mm / Plattengröße 850 x 540 mm / Aktivierzeit: 7 min. / Abkühlzeit: 14 min.

EVA SPEZIAL SANDWICH® RS**EVA PRIMA15 (Shore A) hellgrau - 5 mm - polsternd - dämpfend /****EVA PRIMA 30 (Shore A) hellblau 8 mm - hochelastisch**

Gesamtstärke 13 mm / Plattengröße 900 x 590 mm / Aktivierzeit: 4 min. / Abkühlzeit: 8 min.

EVA SPEZIAL SANDWICH® H**EVA 35 (Shore A) türkis - 7 mm - hochelastisch / EVA 50 (Shore A) hellgrau - 8 mm - stützend**

Gesamtstärke 15 mm / Plattengröße 780 x 550 mm / Aktivierzeit: 6 min. / Abkühlzeit: 12 min.

LaNe® EVA SKIN 30 (Shore A)**4 mm - anformend - Plattengröße 800 x 780 mm / Aktivierzeit: 2 min. / Abkühlzeit: 4 min.**

verklebt mit LaNe® TECH HT-Spezialkleber



ab 105kg

INTELLI-PURFLEX

gelb - 2,5 mm - druckentlastend - Plattengröße 1370 x 1000 mm

KOMBINATIONSEMPFEHLUNG

Flexible und hoch-
temperaturbeständige
Verklebungen fertigen wir
auf Wunsch gerne
für Sie!

AKTIVIERMAGNETE

Die vorgegebenen Aktivier- und Abkühlzeiten sollten als verlässliche Parameter von Ihnen zur Verarbeitung genutzt werden.

Den hierfür notwendige Kurzzeitmesser und die Magnettafeln können Sie bei uns ordern.



AKTIVIER- UND ABKÜHLZEITEN EVA SPEZIAL SANDWICH®



VARIANTE	GEWICHT	AKTIVIERZEIT	ABKÜHLZEIT
A	65 Kg	6 min.	12 min.
B	85 Kg	6 min.	12 min.
C	105 Kg	3 min.	6 min.
D	85 Kg	5 min.	10 min.
E	85 Kg	6 min.	12 min.
E-XL	85 Kg	7 min.	14 min.
F	105 Kg	2,5 min.	5 min.
G	85 Kg	5 min.	10 min.
H	105 Kg	6 min.	12 min.
I	85 Kg	4 min.	8 min.
N-XL	105 Kg	7 min.	14 min.
RS	105 Kg	4 min.	8 min.

OFEN-EINSTELLUNG
130 - 150°C.
Die Angaben beziehen sich auf die Aktivierung im geschlossenen Wärmeofen!

FRAGEN?
Thomas Niebergall
+49(0)160 - 97230513
thomas.niebergall@wr-lang.de



AKTIVIER- UND ABKÜHLZEITEN EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX®



VARIANTE	GEWICHT	AKTIVIERZEIT	ABKÜHLZEIT
A TRIPLEX	65 Kg	7 min.	14 min.
E TRIPLEX	85 Kg	7 min.	14 min.
H TRIPLEX	105 Kg	7 min.	14 min.
K TRIPLEX	85 Kg	7 min.	14 min.
M TRIPLEX	105 Kg	7 min.	14 min.
N TRIPLEX	>= 105 Kg	6 min.	12 min.
S TRIPLEX	85 Kg	4,5 min.	9 min.

OFEN-EINSTELLUNG
130 - 150°C.
Die Angaben beziehen sich auf die Aktivierung im geschlossenen Wärmeofen!

FRAGEN?
Thomas Niebergall
+49(0)160 - 97230513
thomas.niebergall@wr-lang.de



1.2 EVA SPEZIAL TRIPLEX®

EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX®-Produkte stehen für ein Höchstmaß an Effizienz, Versorgungsqualität und Wirtschaftlichkeit. Bereits während des Produktionsprozesses werden diese Produkte aus drei verschiedenen EVA-Rezepturen miteinander dauerhaft und unlöslich vernetzt.

Die Produkte sind bis zu einer Maximalstärke von 22 mm lieferbar. Somit ist in den meisten Fällen die gewünschte Versorgung, ob Fußbettung oder individuelle Fußeinlageversorgung, in einem Arbeitsgang über das Modell anzuformen und dann in Form zu schleifen.

Ein weiteres Beziehen kann aufgrund der glatten EVA-Oberflächen entfallen. Patient:innen können die Versorgung ohne störende und die Weichheit reduzierende Verklebung nutzen. Dies ist auch bei Versorgungen die ständig mit Feuchtigkeit in Berührung sind, so zum Beispiel bei einem Badeschuh, ein entscheidender Vorteil.

EVA SPEZIAL TRIPLEX® Produkte lassen sich in zwei unterschiedliche Versorgungsprinzipien unterteilen. Hierbei spielt die Reihenfolge der verwendeten Funktionsschichten eine ausschlaggebende Rolle.




VERSORGUNGSPRINZIP 1

anformend / hochelastisch / stützend

Einsatz von EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® Produkten

Versorgungsprinzip 1 funktioniert ausgezeichnet bei weniger stark ausgeprägten Fußdeformitäten und bis zu mittleren Aktivitätsgraden. Sollen optional nachträgliche Entlastungszonen eingebaut werden, funktioniert dies erst mit einer unteren stützenden, Schicht ab ca. 45 Shore A.

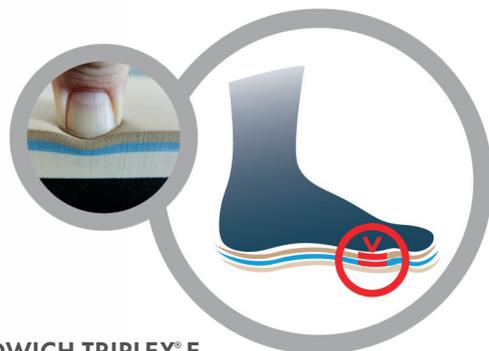

Versorgungsbeispiel

Variante EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® E



bis 85kg

SCHICHTAUFBAU	STÄRKE	FUNKTION
EVA SKIN 20	4 mm	anformend
EVA 25	4 mm	hochelastisch
EVA 45	12 mm	stützend

Die Kombination von unglaublichem Tragekomfort mit enormer Kantens stabilität für die effiziente Herstellung von:

- Adaptierte Fußbettung für Diabetiker/Rheumatiker
- Bei einem Körpergewicht von 105 kg oder mehr hat EVA Prima 15 eine anformende Funktion
- Bei einem Körpergewicht von bis zu 85 kg hat EVA Prima 15 eine hochelastische Funktion, eignet sich aufgrund der hohen Weichheit aber ebenso.
- Optisch ansprechende Variante für komfortorientierte Fußbettung bei unterschiedlichsten Krankheitsbildern.



bis 65 kg

EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® A

- EVA SKIN 20 (Shore A) hautfarben - 5 mm - anformend
- EVA PRIMA 22 (Shore A) mango - 5 mm - hochelastisch
- EVA 35 (Shore A) türkis - 12 mm - stützend

Gesamtstärke 22 mm / Plattengröße 1000 x 620 mm / Aktivierzeit: 7 min. / Abkühlzeit: 14 min.



bis 85 kg

EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® E

- EVA SKIN 20 (Shore A) hautfarben - 4 mm - anformend
- EVA 25 (Shore A) retroblau - 4 mm - hochelastisch
- EVA 45 (Shore A) elfenbein - 12 mm - stützend

Gesamtstärke 20 mm / Plattengröße 920 x 580 mm / Aktivierzeit: 7 min. / Abkühlzeit: 14 min.



bis 105 kg

EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® H

- EVA SKIN 25 (Shore A) hautfarben - 5 mm - anformend
- EVA 35 (Shore A) apfelgrün - 7 mm - hochelastisch
- EVA 50 (Shore A) cappuccino - 8 mm - stützend

Gesamtstärke 20 mm / Plattengröße 920 x 580 mm / Aktivierzeit: 7 min. / Abkühlzeit: 14 min.



ab 105 kg

EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® N

- EVA 15 (Shore A) hellgrau - 5 mm - anformend
- EVA 30 (Shore A) hellblau - 5 mm - hochelastisch
- EVA 55 (Shore A) grau - 12 mm - stabilisierend

Gesamtstärke 22 mm / Plattengröße 860 x 540 mm
Aktivierzeit: 6 min. / Abkühlzeit: 12 min.



VERSORGUNGSPRINZIP 2

anformend / stabilisierend / dämpfend



EFFIZIENZ IN VOLLENDUNG!

1x tiefziehen ermöglicht Herstellung einer 3-schichtigen adaptierten Fußbettung!

Einsatz von EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® Produkten

Das Versorgungsprinzip 2 ist dort zu empfehlen, wo eine stabilisierende mittlere Schicht im Bettungsbau oder einer individuellen Einlagenversorgung sinnvoll erscheint. Diese stabilisierende Schicht mit EVA 55 (Shore A) wird bereits während des Produktionsprozesses unlöslich vulkanisiert. Alle drei vulkanisierten Schichten bestehen aus hochwertigem EVA und es entstehen weder Übergänge noch störende Druckstellen, welche bei einer Verklebung von verschiedenen Materialien auftreten können. Bei schalenförmiger Ausführung von z.B. adaptierten Fußbettungen und individuell gefertigten Einlagen bietet diese mittlere EVA-Schicht eine deutlich höhere Stabilisierung. Die Ränder der Einlagen haben eine höhere Formbeständigkeit. Scherkräfte, die während des Gehens entstehen, werden deutlich reduziert.



Versorgungsbeispiel

Variante EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® M



SCHICHTAUFBAU	STÄRKE	FUNKTION
EVA SKIN 25	6 mm	anformend
EVA 25	2 mm	stabilisierend
EVA 45	12 mm	dämpfend



bis 85 kg

EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® S

EVA 25 (Shore A) anthrazit - 3 mm - hochelastisch

EVA 55 (Shore A) gelb - 3 mm - stabilisierend

EVA 45 (Shore A) dunkelblau - 8 mm - dämpfend

Gesamtstärke 14 mm / Plattengröße 750 x 540 mm

Aktivierzeit: 4,5 min. / Abkühlzeit: 9 min.



bis 105 kg

EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® M


EVA SKIN 25 (Shore A) hautfarben - 6 mm - anformend

EVA 55 (Shore A) türkis - 2 mm - stabilisierend

EVA 45 (Shore A) orange - 12 mm - dämpfend

Gesamtstärke 20 mm / Plattengröße 850 x 520 mm

Aktivierzeit: 7 min. / Abkühlzeit: 14 min.

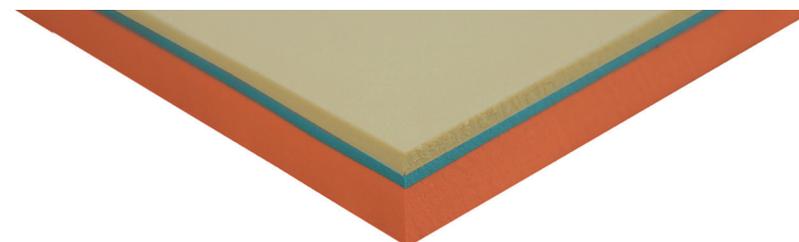



Punktuelles Entlasten

Ausschleifen der zu entlastenden Bereiche von unten

Vorteile

- Fließende Übergänge, keine verhärtenden Klebeschichten vorhanden!
- Von oben bleibt eine geschlossenzellige und homogene Oberfläche erhalten.



Das Einsetzen eines weicheren PUR-Polstermaterials (z.B. Intelli-Purflex oder Purflex) ergibt ergänzend zur gewünschten Adaption signifikant verbesserte Werte bei der Messung der Druckumverteilung. Die hier gezeigten PUR-Polstermaterialien zeichnen sich gerade bei schwergewichtigen Patient:innen (über 105 kg Körpergewicht) durch eine sehr gute und langanhaltende Rückstellfähigkeit aus. In Kombination mit hoher Weichheit garantieren diese Materialien eine hervorragende Druckentlastung.



Als letzte, untere Schicht bietet LaNe® EVA SKIN 70 einen hochstabilisierenden Abschluss. Die adaptierte Fußbettung erhält hier durch eine extrem hohe Kantenstabilität, welche unverzichtbar bei Patienten mit Körpergewichten über 105 kg ist.



1.3 LaNe® EVA SKIN



bis 85 kg

LaNe® EVA SKIN 20

ca. 20 Shore A - anformend bis 85 kg

Temperatur ca. 110 - 130 °C / Plattengröße 900 x 600 mm;
3mm perforiert = ca. 1200 x 900 mm
Lieferbar in 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 20 mm

LaNe® EVA SKIN 40

ca. 40 Shore A - stützend bis 85 kg

Temperatur ca. 130 - 150 °C / Plattengröße 800 x 780 mm
Lieferbar in 2, 3, 4, 6, 8, 10 mm

LaNe® EVA PRIMA SKIN 22

ca. 22 Shore A - hochelastisch bis 85 kg

Temperatur ca. 110 - 130 °C / Plattengröße 850 x 650 mm
Lieferbar in 2, 3, 4, 6, 8 mm



bis 105 kg

LaNe® EVA SKIN 25

ca. 25 Shore A - anformend bis 105 kg

Temperatur ca. 110 - 130 °C / Plattengröße 840 x 840 mm
3mm perforiert = ca. 1680 x 840 mm
Lieferbar in 2, 3, 4, 6, 8, 10 mm

LaNe® EVA SKIN 30

ca. 30 Shore A - hochelastisch bis 105 kg

Temperatur ca. 130 - 150 °C / Plattengröße 800 x 780 mm
Lieferbar in 3, 4, 6, 8, 10 mm



bis 105 kg

LaNe® EVA SKIN 50

ca. 50 Shore A - stützend bis 105 kg

Temperatur ca. 130 - 150 °C / Plattengröße 850 x 590 mm
Lieferbar in 2, 4, 6, 8 mm

LaNe® EVA SKIN 60

ca. 60 Shore A - stützend ab 105 kg

Temperatur ca. 130 - 150 °C / Plattengröße 840 x 560 mm
Lieferbar in 2, 4, 6, 8 mm



ab 105 kg

LaNe® EVA SKIN 70

ca. 70 Shore A - stützend ab 105 kg

Temperatur ca. 130 - 150 °C / Plattengröße 770 x 760 mm
2, 3, 4, 6, 8, 10 mm



bis 85 kg




ab 105 kg

LaNe® EVA PRIMA 15

ca. 15 Shore A - hochelastisch bis 85 kg - anformend ab 105 kg

Temperatur ca. 100 - 110 °C / Plattengröße 920 x 650 mm;
Lieferbar in 2, 3, 4, 6, 8 mm

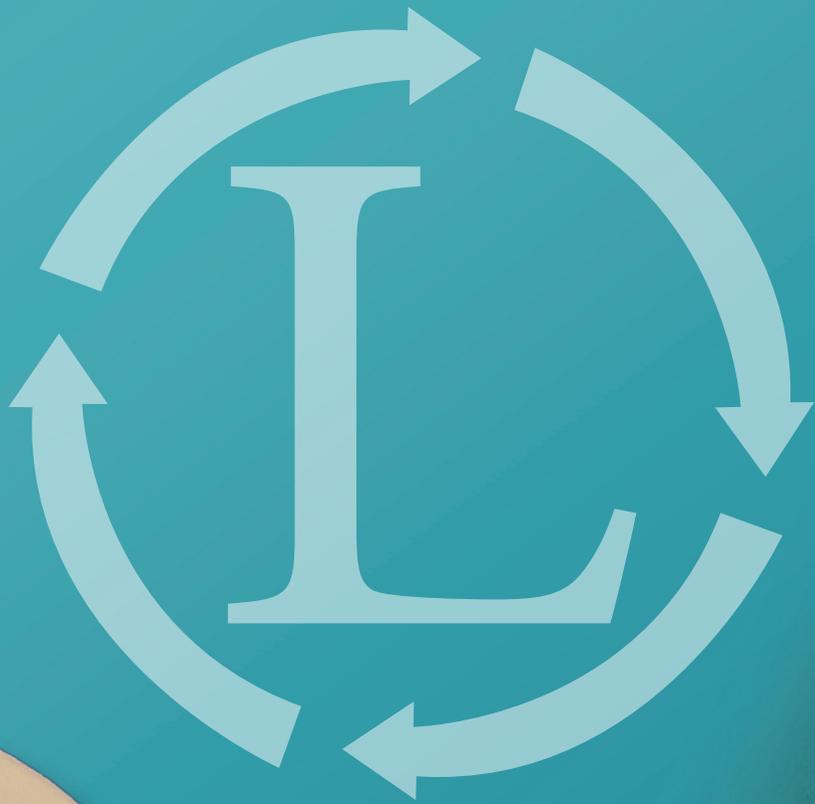

WICHTIG FÜR UNS: ZUFRIEDENE KUNDEN!

1.4 Colorfoam


Polster- und Bezugsmaterial auf hochwertiger EVA-Basis

**Plattengröße ca. 1000 x 1000 mm,
thermisch verformbar bei 110 - 130° C,**

Stärken: 1 - 5 mm

Auch perforiert in den Stärken 2 - 5 mm lieferbar.

Verfügbare Farben: gelb (204), haut (206), beige (217), braun (246), orange (271), blau (275), dunkelblau (278), schwarz (281), rot (289), grün (298)

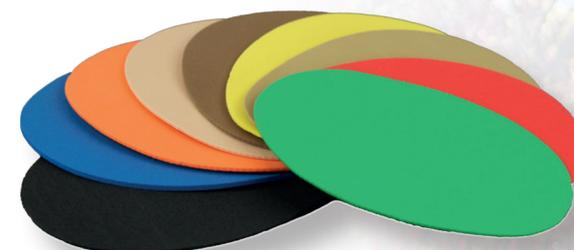

1.5 EVA SPEZIAL MARMOR

EVA Platte, ca. 35 Shore A

**Plattengröße ca. 1050 x 900 mm,
thermisch verformbar bei 110 - 130° C, Stärken: 1-5 mm**

Verfügbare Farben: orange (2), blau (3), grün (4), schwarz (5), beige (6), hellgrün (7)

1.6 EVA Spezial 2-farbig

EVA Platte, ca. 30-35 Shore A

**Plattengröße ca. 1000 x 1000 mm
thermisch verformbar bei 110 - 130° C, Stärken: 1-5 mm**

Verfügbare Farben: schwarz/weiß (1), weiß/blau (3), orange/blue (4). multi/vierfarbig



WICHTIG FÜR UNS: HOCHWERTIGE MATERIALIEN AN DEN KUNDEN ZU GEBEN.

2. FRÄS- MATERIALIEN

SELBST ZUSAMMENSTELLEN ODER EINFACH AUF BEWÄHRTES ZURÜCKGREIFEN?

Unsere Fräsrohlinge ...

... sind aus hochwertigem EVA hergestellt. Es entsteht ein sehr feines Fräsbild, somit reduzieren sich die Nacharbeiten um ein Vielfaches. Bei den vernetzten Varianten sind die Übergänge der einzelnen Farben bzw. Shorehärten sehr gleichmäßig und geradlinig. Die nachfolgenden Frästreifen zeigen nur einen kleinen Ausschnitt möglicher Varianten.

2.1 Frässhmiegekeile

Frässhmiegekeil 3-sch.blau25/weiß30/schwarz50

Art. 3-3-2533-3-02-274

Maß ca.: 970 x 360 x 33/12 mm

Qualität: 26/5 mm Schmiege Keil blau 25 Shore A
5 mm Megafoam weiß 30 Shore A
2 mm EVA schwarz 50 Shore A

Alle Schichten sind verklebt



Frässhmiegekeil 3-sch.beige35/rot25/schwarz50

Art. 3-3-3532-3-02-208

Maß ca.: 1050 x 340 x 32/12 mm

Qualität: 25/5 mm EVA SPEZIAL Color beige 35 Shore A
5 mm Colorfoam rot 25 Shore A
2 mm EVA schwarz 50 Shore A

Alle Schichten sind verklebt



Fragen Sie nach unseren weiteren Fräsmaterialien und Kombinationen.
Wir beraten Sie gerne! service@w-r-lang.de

Werden Sie kreativ!

Sie haben die Wahl zwischen einer Vielzahl von Materialien und verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten (Plattenware, Stanzware, Keilstreifen und Streifen) zu wählen und diese ebenfalls in Stärke und Shorehärte zu konfigurieren. Falls Sie stattdessen auf unsere bewährten Kombinationen zurückgreifen möchten ist das selbstverständlich auch möglich.

Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit!

Weitere Informationen über
Umsetzbarkeit/Preise/Mindestmengen
unter
Tel.: 02631 / 3455-10

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Frässhmiegekeil 3-sch.dblau35/weiß25/schwarz50

Art. 3-3-3532-3-02-278

Maß ca.: 1050 x 340 x 32/12 mm

Qualität: 25/5 mm EVA SPEZIAL Color dunkelblau 35 Shore A
5 mm Megafoam weiß 25 Shore A
2 mm EVA schwarz 50 Shore A

Alle Schichten sind verklebt



Frässhmiegekeil 3-sch.schwarz50/weiß35/schwarz50

Art. 3-3-5036-4-02-281

Maß ca.: 2000 x 330 x 36/16 mm

Qualität: 27/7 mm EVA SPEZIAL schwarz 50 Shore A
7 mm Megafoam weiß 35 Shore A
2 mm EVA schwarz 50 Shore A

Alle Schichten sind verklebt



WICHTIG FÜR UNS: ALLE KOMBINATIONEN ANZUBIETEN.

Frässhmiegekeil 3-sch.weiß35/blau25/schwarz50

Art. 3-3-3532-7-02-209

Maß ca.: 960 x 346 x 32/12 mm

Qualität: 25/5 mm EVA SPEZIAL SANDWICH® CAD weiß 35 Shore A
5 mm EVA SPEZIAL SANDWICH® CAD blau 25 Shore A
2 mm EVA schwarz 50 Shore A

Die Schichten weiß und blau sind vernetzt

Frässhmiegekeil 3-sch.rot45/grün25/schwarz50

Art. 3-3-4532-7-02-289

Maß ca.: 960 x 330 x 32/12 mm

Qualität: 25/5 mm EVA SPEZIAL SANDWICH® CAD rot 45 Shore A
5 mm EVA SPEZIAL SANDWICH® CAD grün 25 Shore A
2 mm EVA schwarz 50 Shore A

Die Schichten rot und grün sind vernetzt

2.2 Frästreifen

Frästreifen 3-sch.dblau45/weiß35/schwarz60

Art. 3-3-4532-7-01-278

Maß ca.: 760 x 320 x 32 mm

Qualität: 25 mm EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® CAD dkl.blau 45 Shore A
5 mm EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® CAD weiß 35 Shore A
2 mm EVA SPEZIAL SANDWICH® CAD schwarz 60 Shore A

Alle Schichten sind vernetzt

Frästreifen 3-sch.schwarz45/orange35/schwarz60

Art. 3-3-4532-7-01-281

Maß ca.: 760 x 320 x 32 mm

Qualität: 25 mm EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® CAD Schwarz 45 Shore A
5 mm EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® CAD orange 35 Shore A
2 mm EVA SPEZIAL SANDWICH® CAD schwarz 60 Shore A

Alle Schichten sind vernetzt

3. AUFBAU- MATERIALIEN

3.1 EVA-AUFBAUPLATTEN

Unsere hochwertigen EVA-Leichtzellaufbauplatten erhalten Sie in spezifisch leicht von Weich (Dichte 0,19 Gramm, Härte ca. 30 Shore A) bis Fest (Dichte 0,29 Gramm, Härte ca. 60 Shore A) in der gezeigten Farbvielfalt.

Das Sortiment wird ständig für Sie erweitert und optimiert.

Einsatzgebiete: Boden- und Bettungsbau, Dämpfungskeile, Einlagendecken, Polsterungen aller Art.

192 lichtgrau	207 hautfarben	209 weiß	217 graubeige	219 stein	235 mittelbraun	241 blassbraun
246 dunkelbraun	254 smoke	256 steingrau	260 hellgrau	278 dunkelblau	280 anthrazit	281 schwarz
270 gelb	275 blau	289 rot	307 rosa	328 bordeaux	354 pink	



EVA SPEZIAL 30 950 x 500 mm

- Hohe Rückstellfähigkeit • Hervorragende Elastizität • ca. 30 Shore A

Verfügbare Farben: 207, 209, 217, 219, 235, 241, 246, 256, 260, 278, 281

EVA SPEZIAL 40 950 x 540 mm

- Perfekte Kombination aus Flexibilität und niedrigem Gewicht • ca. 40 Shore A

Verfügbare Farben: 207, 209, 217, 219, 235, 241, 246, 256, 278, 281

EVA SPEZIAL 50 880 x 510 mm

- Perfekte Kombination aus Stabilität und niedrigem Gewicht • ca. 50 Shore A

Verfügbare Farben: 192, 207, 209, 217, 219, 235, 241, 246, 256, 260, 278, 280, 281
24 mm nur in 209, 217, 219, 246, 281 verfügbar

Auch in bunt: 289, 307, 328, 354

EVA SPEZIAL 60 840 x 490 mm

- Perfekte Kombination aus Flexibilität und hoher Kantenstabilität • ca. 60 Shore A

Verfügbare Farben: 207, 209, 217, 219, 235, 241, 246, 256, 278, 281

EVA SPEZIAL CLEAN® 30 980 x 490 mm

- Hohe Rückstellfähigkeit • Hervorragende Elastizität • ca. 30 Shore A

Verfügbare Farben: 209, 217, 219, 246, 256, 281

EVA SPEZIAL CLEAN® 40 1000 x 500 mm

- Perfekte Kombination aus Flexibilität und niedrigem Gewicht • ca. 40 Shore A

Verfügbare Farben: 209, 217, 219, 246, 256, 281

EVA SPEZIAL CLEAN® 50 1000 x 500 mm

- Perfekte Kombination aus Stabilität und niedrigem Gewicht • ca. 50 Shore A

Verfügbare Farben: 209, 217, 219, 246, 256, 281

EVA SPEZIAL PLUS® 40 800 x 800 mm

- Hervorragende Flexibilität • ca. 40 Shore A

Verfügbare Farben: 271, 289

Alle Platten sind in den gängigen Stärken lieferbar.

Bei individuellen Konfektionierungen kann sich die Lieferzeit gegebenenfalls verlängern.

Gerne lassen wir Ihnen auf Anfrage eine detaillierte Aufstellung unseres Sortiments zukommen.




Hochwertige EVA-Mischung in Shore 30 A, Shore 40 A und Shore 50 A mit antistatischer Ausrüstung
Damit ist ein weitgehend staubfreies Arbeiten möglich.
Lassen Sie sich von den verblüffenden Eigenschaften von EVA SPEZIAL CLEAN® überzeugen!

3.2 EVA-AUFBAUKEILE


EVA SPEZIAL 30 Keil

- ca. 30 Shore A • Keil ca. 1000 mm (Gesamtlänge) x 80 mm (Untertlänge) x 20 mm (Stärke)
- Lieferbar in 207, 209, 217, 219, 235, 241, 246, 256, 260, 278, 281

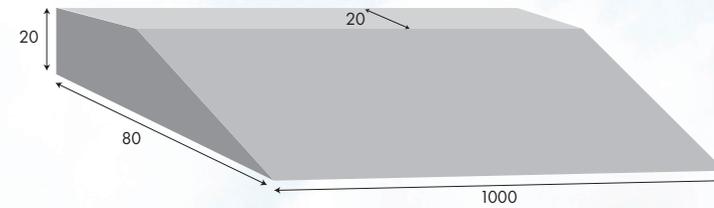


EVA SPEZIAL 50 Keil

- ca. 50 Shore A • Keil ca. 880 mm (Gesamtlänge) x 200 mm (Untertlänge) x 20 mm (Stärke)
- Lieferbar in 192, 207, 209, 217, 219, 235, 241, 246, 254, 256, 260, 278, 280, 281
In 25 mm Stärke in den Farben 246 und 281 lieferbar

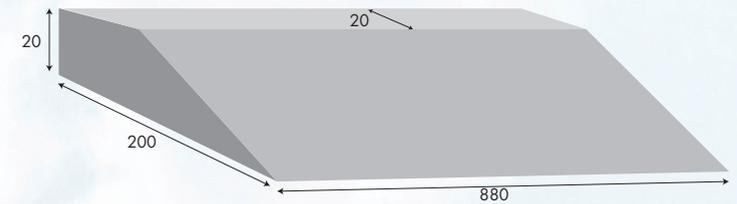


EVA SPEZIAL 60 Keil

- ca. 60 Shore A • Keil ca. 840 mm (Gesamtlänge) x 200 mm (Untertlänge) x 20 mm (Stärke)
- Lieferbar in 209, 217, 219, 246, 256, 281

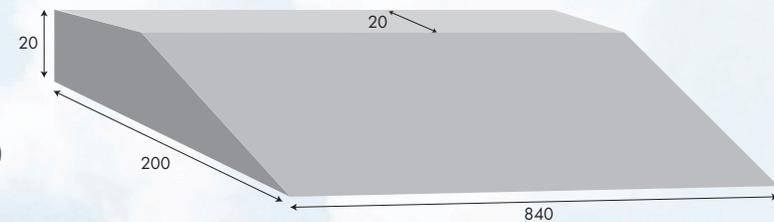

LaNe® Aufbaukeil


- ca. 58 Shore A • Keil ca. 1000 mm (Gesamtlänge) x 230 mm (Untertlänge) x 22 mm (Stärke)
- Lieferbar in 246, 281

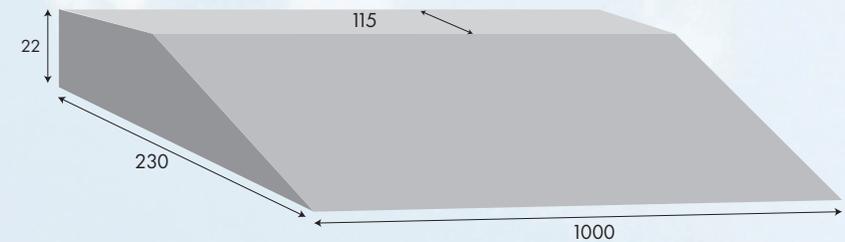

3.3 EVA SPEZ50 AUFBAUSCHMIEGEKEIL

EVA SPEZIAL 50 Aufbauschiegekeil

- ca. 50 Shore A • Keil ca. 1800 mm (Gesamtlänge) x 350 mm (Untertlänge) x 25/10 mm (Stärke)
- Farben: 246 dunkelbraun, 281 schwarz

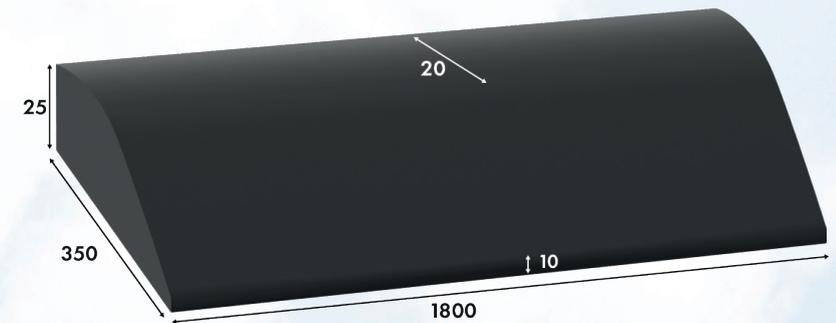

3.4 LANE® EVA-KEILSOHLEN 28/8, LÄNGE CA. 33 CM

Gestanzte Keilsohle, geeignet für Schuhzurichtungen und Neuanfertigungen.
Verfügbar in 11 Farben, Universalgröße.

Lieferbare Farben: 192 lichtgrau, 209 weiß, 217 graubeige, 219 stein,
235 mittelbraun, 241 blassbraun, 246 dunkelbraun, 254 smoke, 256 steingrau,
260 hellgrau, 278 dunkelblau, 280 anthrazit, 281 schwarz



4. STÜTZKORSETTS, ORTHESEN UND PROTHESEN

INNOVATIVES SANDWICHMATERIAL FÜR DIE ORTHOPÄDIETECHNIK

4.1 OT ONE

Plattengröße: 1320 x 800 x7 mm

EVA ca. 25 Shore A - polsternd / EVA ca. 70 Shore A - stützend

Aktivier-/Abkühlzeit ca. 2-3 Minuten

Bei der bisherigen, konventionellen Versorgung von Kindern mit Lähmungen durch Zerebralparese bieten thermoplastische HD-PP oder PE-Platten eine ausgezeichnete Stabilität, jedoch mangelt es an jeglicher Polsterung.

Einen gewissen Komfort erreicht man nur durch Ausschleifen im Kantenbereich; wobei diese Kanten dann messerscharf werden. Aus dieser Problematik entstand die Idee für eine neue – aus zwei unterschiedlichen EVA-Materialien vernetzte – Sandwich-Variante:

Sandwich OT ONE

Dieses Produkt vereint das benötigte Maß an Stabilität (Außenseite: EVA ca. 70 Shore A) in der Abbildung kombiniert mit einer Innenpolsterung (Innenseite: EVA ca. 25 Shore A)

Weitere Vorteile:

1. Restkomfort durch geringere Härte - im Vergleich zu o.g. PP- oder PE-Platten
2. Extremes Dünnschleifen deshalb nicht notwendig – auch aufgrund der Materialeigenschaften können hier keine messerscharfen Kanten entstehen.
3. Nieten – welche zur Befestigung von Verschlusselementen benötigt werden – liegen nicht auf der Oberfläche, sondern ziehen sich soweit in das Material OT ONE, dass zur Haut keine störenden Kontaktstellen entstehen können.

SCHICHTAUFBAU	FUNKTION	FARBE	STÄRKE
EVA ca. 25 Shore A	polsternd	grün	ca. 4 mm
EVA ca. 70 Shore A	stützend	elfenbein	ca. 3 mm



4.2 OTTWO

Plattengröße: 1320 x 800 x 9 mm


EVA ca. 25 Shore A - polsternd / EVA ca. 70 Shore A - stützend


Aktivier-/Abkühlzeit ca. 5-6 Minuten

- Ruhigstellung des Handgelenks nach operativen Eingriffen, Gelenkkontrakturprophylaxe
- Karpaltunnelsyndrom
- Tendovaginitis
- rheumatische Arthritis



SCHICHTAUFBAU	FUNKTION	FARBE	STÄRKE
EVA ca. 25 Shore A	polsternd	karibikblau	ca. 4 mm
EVA ca. 70 Shore A	stützend	steingrau	ca. 5 mm

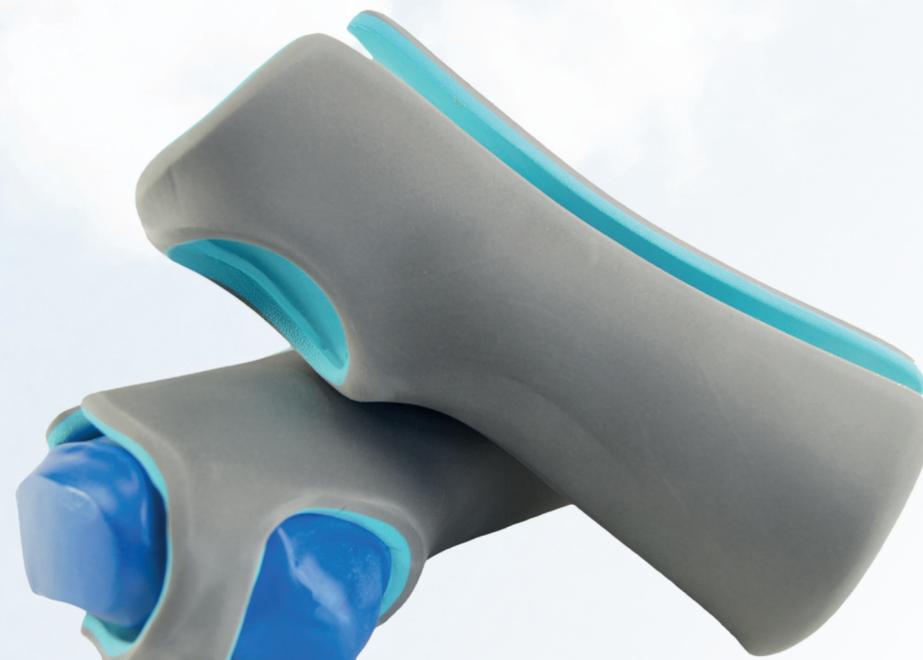

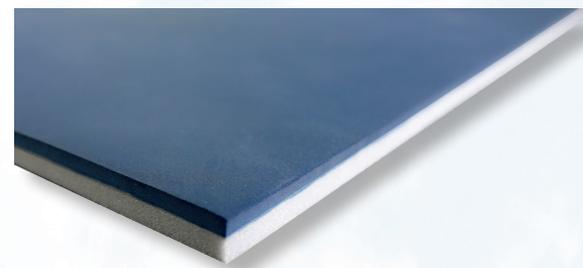

4.3 OT THREE

Plattengröße: ca. 1320 x 800 x 8 mm

EVA PRIMA 15 Shore A - druckentlastend / EVA 70 Shore A - stützend

Aktivierzeit 7 min. /

Abkühlzeit: der Zeitpunkt ist erreicht, sobald die Oberflächentemperatur unter 50 ° C liegt

Besonderheiten und Unterschiede zu den anderen Sandwich® OT Varianten:

Uns ist es gelungen zwei EVA Rezepturen mit extrem variierenden Shorehärten (15 und 70 Shore A) miteinander zu vulkanisieren.

Die druckentlastende Schicht aus EVA PRIMA15, bereits bekannt aus unserem EVA Standardsortiment, sowie der EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® N, ist im Vergleich nochmals 10 Shore weicher als die polsternden erste Schicht der Varianten SANDWICH® OT ONE und OTTWO. Dies bietet bei der Versorgung der Patient:innen den Vorteil einer höheren Druckentlastung. Diese wichtige Eigenschaft zeigt sich nicht nur punktuell. Auch großflächig wird eine gute Druckreduzierung erreicht. Gleichzeitig bleibt die Dauerelastizität größtmöglichst erhalten.

Die zweite Schicht aus EVA Shore 70 bringt der Versorgung die notwendige Stabilität.

Diese neue Materialkombination wurde konzipiert zur Versorgung von hochsensiblen Patient:innenfüßen und ist prädestiniert für Interimsversorgungen nach Vorfußamputation, beispielsweise bei Diabetikern.

SCHICHTAUFBAU	FUNKTION	FARBE	STÄRKE
EVA ca. 15 Shore A	druckentlastend	hellgrau	ca. 5 mm
EVA ca. 70 Shore A	stützend	marineblau	ca. 3 mm



5. INDIVIDUELLE KONFEKTIONIERUNG

FORDERN SIE UNS. STANZEN – SPALTEN – KLEBEN

Gerne fertigen wir nach Ihren Vorgaben. Sie finden hier eine Übersicht über unser Dienstleistungsangebot.

Fertigung von individuellen Fräsrohlingen und Fräsblöcken. Teilen Sie uns Ihre Wünsche und Anforderungen mit und wir gestalten mit Ihnen gemeinsam Ihr individuelles Produkt.

Die Ansprüche in der Einlagenversorgung steigen stetig. Wir gestalten und fertigen nach Ihren Angaben Einlagenrohlingen für die individuelle Versorgung Ihrer Patienten.

Aus unserem reichhaltigen Plattenwarenangebot kaschieren wir für Sie nahezu alle Materialien nach Ihren Wünschen zu Ihrer eigenen Kombination.

Sollte Ihnen die Standard-Plattenstärke nicht zusagen, spalten wir die Platte gerne auf ihre Wunschstärke herunter oder schneiden die Platte nach Ihren Vorgaben. Gerne erledigen wir auch Stanzarbeiten für Sie. Fordern Sie zur weiteren Information hierzu unseren Stanzmesser katalog an.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



EVA Skin EVA SPEZIAL EVA SPEZIAL PLUS EVA SPEZIAL EXTRA EVA SPEZIAL CLEAN® EVA SPEZIAL SANDWICH®
SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® SANDWICH® OT EVA Skin EVA SPEZIAL EVA SPEZIAL PLUS EVA SPEZIAL EXTRA
SPEZIAL CLEAN® EVA SPEZIAL SANDWICH® EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® SANDWICH® OT EVA Skin EVA S
ZIAL EVA SPEZIAL PLUS EVA SPEZIAL EXTRA EVA SPEZIAL CLEAN® EVA SPEZIAL SANDWICH® EVA SPEZIAL
CH TRIPLEX® SANDWICH® OT EVA Skin EVA SPEZIAL EVA SPEZIAL PLUS EVA SPEZIAL EXTRA EVA
SANDWICH® EVA SPEZIAL SANDWICH TRIPLEX® SANDWICH® OT EVA S
EVA SPEZIAL CLEAN® EVA SPEZIAL SANDWICH

W. R. Lang GmbH | Hafenstraße 83 | 56564 Neuwied
Fon: +49 (0)2631 34 55 10 | Fax: +49 (0)2631 34 55 30
E-Mail: service@w-r-lang.de | Internet: w-r-lang.de | Onlineshop: shop.w-r-lang.de
Geschäftsführer: Laura Lang, Julian Lang und Martin Lang
Registergericht: Amtsgericht Montabaur | Handelsregister Registernummer: HRB 12351
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE206667519

Art.-Nr. 90 983